



CARDIAC INTERVENTION

SAFEGUARD[®]

APÓSITO PARA COMPRESIÓN ASISTIDA



Mantener la presión
con Safeguard[®]

¿POR QUÉ TENER QUE MANTENER LA PRESIÓN CUANDO SAFEGUARD PUEDE HACERLO?

Deje que Safeguard le ayude a conseguir y mantener la **HEMOSTASIA**. El ensayo clínico Safeguard Manual Assist Technique (Técnica Manual Asistida - MAT) demuestra que el Safeguard de 24 cm es seguro y efectivo a la hora de reducir el **TIEMPO DE COMPRESIÓN** activa en el punto de punción de la arteria femoral tras los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con un TCA de hasta 140 segundos cuando se utiliza un introductor de hasta 6F. Safeguard **SIMPLIFICA** el manejo antes y después de la hemostasia en la zona de acceso. Reduce la carga de trabajo del personal, y permite aprovechar al máximo los recursos valiosos, a la vez que aumenta la **COMODIDAD** del paciente.

Safeguard®

24 cm Apósito para
compresión asistida

Safeguard®

12 cm Apósito de
compresión asistida

PRESIÓN REAL

Safeguard proporciona una compresión activa ajustable y permite una regulación inmediata de la presión

Mantiene una presión constante sobre la zona durante la recuperación del paciente, así como durante su colocación y traslado

Proporciona un control del manejo de la zona en los pacientes que no quieren cooperar

Facilita la evaluación de la zona mediante una ventana transparente sin necesidad de retirar el apósito

Se puede utilizar a modo de vendaje estéril para evitar la contaminación de la zona de la herida

COMODIDAD REAL

Safeguard es cómodo para el paciente

Mantiene una presión uniforme sobre la zona cuando se pretende lograr la hemostasia mediante compresión manual

En el ensayo clínico, el 87% de los pacientes que habían sido sometidos a un procedimiento de cateterización en el pasado indicaron que el Safeguard con la técnica MAT era "mucho más cómodo" que cualquier otro procedimiento anterior¹

El Safeguard, una vez inflado, se adhiere al paciente independientemente de su anatomía

SAFEGUARD® 24 CM

Reduce El Tiempo De Compresión Activa¹

	Diagnóstico	Terapéutico
Tiempo de compresión activa (minutos)	5	10
Tiempo de compresión pasiva (minutos)	120	240
Tiempo total de compresión (minutos)	125	250

Baja Tasa De Complicaciones

Safeguard presenta una tasa media de complicaciones baja frente a la compresión manual

Tasa Total De Complicaciones Graves (n = 101)

Pacientes con Safeguard ¹	1,0%
Compresión manual ²	2,4%

¹ Datos de archivo.

² Manual compression subset from the Reduced Vascular complications After Percutaneous Coronary Interventions with a Nonmechanical Suture Device: Results from the Randomised RACE Study, Sanborn, TA.

SAFEGUARD®

DATOS TÉCNICOS

	Safeguard 12 cm	Safeguard 24 cm	
Longitud	12 cm	24 cm	
Anchura	7,5 cm	12,8 cm	
Altura del balón	1,3 cm @ 4 mL	2,5 cm @ 30 mL	
Volumen máximo de inflación	7 mL	40 mL	
Presión ejercida por el balón a volúmenes de aire específicos*	3 mL	1,33 lbs. (0,60 kg)	-
	5 mL	3,22 lbs. (1,46 kg)	-
	7 mL	6,32 lbs. (2,87 kg)	-
	20 mL	-	4,54 lbs. (2,06 kg)
	30 mL	-	12,16 lbs. (5,52 kg)
	40 mL	-	20,53 lbs. (9,31 kg)

* Las mediciones se realizaron sobre una placa de acero por lo que la experiencia puede ser distinta en las personas ya que la piel y el tono muscular pueden influir sobre la fuerza ejercida.

CUADRO DE PRODUCTOS

Nº de Referencia	Tamaño	Descripción
82000	24 cm	Apósito de compresión asistida Safeguard (fuera de los EEUU)
82000D	24 cm	Apósito de compresión asistida Safeguard (solo EEUU)
82050	12 cm	Apósito de compresión asistida Safeguard



Merit Medical Europe, Middle East,
and Africa (EMEA)

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
Tel: +31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Free Phone for Specific Country

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (French)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Sweden
020 792 445

Switzerland
00800 9000 5060

UK
0800 973 115

ID 021214 400370002/A