

Sistema de endoprótesis coronaria de cromo cobalto

Yukon[®] CC

*Translumina -
Atraviesa todas
las lesiones*



trust is what counts

translumina[®]

Yukon[®] CC

Superficie microporosa que marca la diferencia

Translumina **Yukon[®] CC** representa la tecnología de nueva generación para los sistemas de endoprótesis basados en una aleación de cromo cobalto.

Se trata de la primera endoprótesis de CrCo con una exclusiva superficie microporosa.

Yukon CC continúa con la filosofía de Translumina Surface y mejora la cicatrización y la biocompatibilidad del implante.

Consulte la información detallada en la bibliografía [1,2,3].


Superficie única de la endoprótesis

La superficie microporosa de Translumina, conocida como **PEARL Surface**, favorece la endotelización, que es esencial para evitar la trombosis y la restenosis.

Grosor del puntal

Gracias al pequeño grosor del puntal, de aproximadamente 68µm, la endoprótesis tiene excelentes propiedades de cicatrización.

MEE (microscopia electrónica de escaneado)

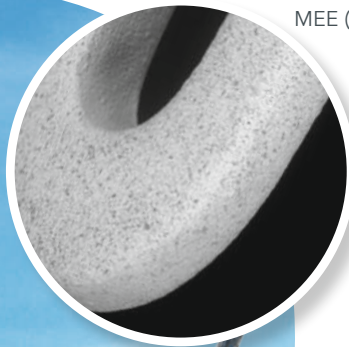

Características de la superficie

- aprox. 1 millón de poros por cm²
- profundidad promedio de los microporos de aproximadamente 2 µm
- 100% de cobertura de la superficie por parte de los poros

Bibliografía

- [1] Dibra et al, Catheterization and Cardiovascular Interventions 2005, 65, 374-380; Results to 6 months, n=100 BMS with rough surface vs. n=100 with polished surface
- [2] Palmaz et al, Journal of Vasc. Surg., 2002, 36, 2001-09.
- [3] Fitzgerald et al, Expert Opin. Drug Deliv. 2007, 4, 287-295.
- [4] Mortier et al, EuroInterv.2008;4,391-396




El nuevo sistema de endoprótesis de cromo cobalto de alta tecnología

Una endoprótesis de cromo cobalto diseñada para todas las lesiones


Colocación de endoprótesis en bifurcación

Con una circunferencia de la celda de hasta 18,5mm, Yukon CC permite un acceso perfecto a la rama lateral, el cual es esencial para la colocación de endoprótesis en bifurcación ^[4].

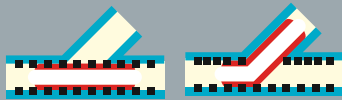

Diseño con 2 conectores

El nuevo diseño con solo dos puntales de conexión garantiza la máxima flexibilidad y el acceso a la rama lateral.

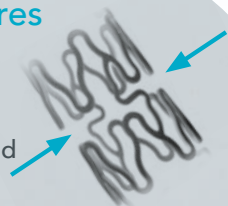

El catéter adecuado...

La luer ha sido diseñada con una protección contra los acodamientos integrada.

El extremo flexible asegura una atravesabilidad y una maniobrabilidad perfectas.



Datos técnicos y características de la endoprótesis

Aleación de cromo cobalto (L605)
Superficie con microporos

Perfil de atravesabilidad (Ø 2,5 mm)	0,035" / 0,89 mm
Grosor del puntal (Ø 2,5 mm)	0,0027" / 68µm (SV), 0,0031" / 79µm (MV)
Superficie metálica	9,1 - 14,9%
Material del balón marcador	Platino / Iridio
Perfil de entrada	0,016" / 0,41 mm
Diámetro del vástago proximal	1,9 F
Diámetro del vástago distal	2,7 F
Aguja guía recomendada	0,014"
Catéter guía	mín. 5 F

Yukon®CC

Yukon[®] CC

Información para pedidos*

Diseño para vasos pequeños (VP)

Balón Ø [mm]	Longitud de la endoprótesis [mm] y número de artículo							
	8	12	16	18	21	24	28	32
Ø 2,00	T-CMG2008	T-CMG2012	T-CMG2016	T-CMG2018	T-CMG2021	T-CMG2024	T-CMG2028	T-CMG2032
Ø 2,25	T-CMG22508	T-CMG22512	T-CMG22516	T-CMG22518	T-CMG22521	T-CMG22524	T-CMG22528	T-CMG22532
Ø 2,50	T-CMG2508	T-CMG2512	T-CMG2516	T-CMG2518	T-CMG2521	T-CMG2524	T-CMG2528	T-CMG2532

matriz de productos

Diseño para vasos medianos (VM)

Balón Ø [mm]	Longitud de la endoprótesis [mm] y número de artículo								
	8	12	16	18	21	24	28	32	40
Ø 2,75	T-CMG27508	T-CMG27512	T-CMG27516	T-CMG27518	T-CMG27521	T-CMG27524	T-CMG27528	T-CMG27532	T-CMG27540
Ø 3,00	T-CMG3008	T-CMG3012	T-CMG3016	T-CMG3018	T-CMG3021	T-CMG3024	T-CMG3028	T-CMG3032	T-CMG3040
Ø 3,50	T-CMG3508	T-CMG3512	T-CMG3516	T-CMG3518	T-CMG3521	T-CMG3524	T-CMG3528	T-CMG3532	T-CMG3540
Ø 4,00	T-CMG4008	T-CMG4012	T-CMG4016	T-CMG4018	T-CMG4021	T-CMG4024	T-CMG4028	T-CMG4032	T-CMG4040

* Comuníquese con nuestro servicio de Atención al Cliente para averiguar los tamaños disponibles.

Tabla de distendibilidad

Balón Ø [mm]	Presión de inflado [en bar o 10 ⁻⁵ pascuales]														
						NP:					RBP				
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ø 2,00	1,83	1,87	1,90	1,93	1,96	2,00	2,03	2,06	2,10	2,13	2,16	2,20	2,23	2,26	2,29
Ø 2,25	2,08	2,11	2,14	2,18	2,21	2,25	2,28	2,31	2,35	2,38	2,42	2,45	2,48	2,52	2,55
Ø 2,50	2,33	2,36	2,40	2,43	2,47	2,50	2,53	2,57	2,60	2,64	2,67	2,70	2,74	2,77	2,81
Ø 2,75	2,58	2,61	2,65	2,68	2,71	2,75	2,78	2,81	2,85	2,88	2,91	2,94	2,98	3,01	3,04
Ø 3,00	2,81	2,85	2,89	2,92	2,96	3,00	3,04	3,07	3,11	3,15	3,18	3,22	3,26	3,29	3,33
Ø 3,50	3,29	3,34	3,38	3,42	3,46	3,50	3,55	3,59	3,63	3,67	3,71	3,76	3,80	3,84	3,88
Ø 4,00	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	4,06	4,11	4,16	4,21	4,26	4,31	4,36	4,41	4,46



© 2019 Translumina GmbH

Todos los derechos reservados.

® YUKON, PEARL Surface y translumina son marcas registradas de translumina GmbH

Consulte las Instrucciones de uso que se proveen con estos dispositivos para informarse sobre las indicaciones, las contraindicaciones, las reacciones adversas, los procedimientos sugeridos, las advertencias y las precauciones.

Translumina GmbH | Neue Rottenburger Strasse 50
72379 Hechingen | Alemania | info@translumina.de
t + 49 7471 98 94 - 0 | f + 49 7471 98 94 - 360



www.translumina.de